



## ИНСТРУКЦИЯ–ВКЛАДЫШ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

### НАИМЕНОВАНИЕ: ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ КИШЕЧНИКА «АДИАРИН®»

### РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ:

№РЗН 2017/5412 от 19.07.2021

### СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: 1 саше содержит желатина таннат 250 мг.

**ОПИСАНИЕ:** изделие медицинское для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» предназначено для защиты слизистой оболочки кишечника от проникновения бактерий и токсинов.

Функциональное назначение изделия медицинского для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. Изделие медицинское для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» обладает способностью к механическому воздействию, защищая плотные межклеточные соединения эпителиальных клеток в тех случаях, когда они проявляют несостоятельность или разрушены, тем самым предотвращая массовое поступление в слизистую оболочку кишечника бактерий и токсинов из просвета кишечника. Данный эффект обеспечивается за счет механического создания на поверхности слизистой оболочки кишечника защитного слоя.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** защита слизистой оболочки кишечника от проникновения бактерий и токсинов.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** рекомендован для защиты слизистой оболочки кишечника при диарее для детей и взрослых.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** содержимое пакетика высыпать в столовую ложку, смешать с небольшим количеством воды и в таком виде употребить. Или растворить содержимое пакетика в 50 – 100 мл кипячёной воды, охлажденной до комнатной температуры, и полученную суспензию употребить вместе с образовавшимся осадком.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ПАЦИЕНТОВ:

Возраст	С 3 месяцев до 3 лет*	от 3 до 14 лет	старше 14 лет
Количество, необходимое для одного применения	1 пакетик	от 1 до 2 пакетиков**	2 пакетика**
Интервал применения	от 4 до 6 часов	от 4 до 6 часов	от 4 до 6 часов
Время прекращения применения	Восстановление физиологической функции стенки кишечника		

\* после консультации с врачом  
\*\* в зависимости от физиологического состояния стенки кишечника

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость компонентов медицинского изделия. Другие известные противопоказания отсутствуют.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** перед применением изделия медицинского для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» необходимо также принимать во внимание:

Консультации с врачом перед применением изделия медицинского для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» не требуется. Необходимость такой консультации требуется в случае тяжелых или устойчивых симптомов, в основном у детей младше 3 лет и пожилых людей.

В случае диареи у детей младше 3 лет, главным образом, при наличии других симптомов рекомендуется обратиться в лечебное учреждение за консультацией к врачу.

Рекомендуется обильное питье и обычная диета, применяемая при диарее.

Хотя известные побочные эффекты отсутствуют, рекомендуется не применять изделие медицинское для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» во время беременности или в первые месяцы грудного вскармливания. В любом случае всегда предварительно консультируйтесь с врачом.

Не используйте изделие медицинское для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» после истечения срока, указанного на упаковке медицинского изделия.

Не используйте изделие медицинское для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» с поврежденной упаковкой.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 до +40 °С.

**УПАКОВКА:** по 8 пакетиков–саше помещают в картонную пачку вместе с инструкцией–вкладышем по применению.

**ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ:** по истечении срока годности изделие должно утилизироваться в соответствии с местными законами и нормативными положениями. По истечении срока годности медицинское изделие требуется утилизировать в качестве бытовых отходов.

### ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:

JADRAN–GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia  
(ЯДРАН–ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия).

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Noventure SL, Avenida Diagonal, 549, 5ª planta, 08029 Barcelona, Spain  
("Новентуре СЛ", проспект Диагональ, 549, 5-й этаж, 08029 Барселона, Испания).

### МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:

LABOMAR S.P.A., Via N.Sauro 35/1, 31036 Istrana (TV), Italy  
(ЛАБОМАР С.П.А., Виа Н.Сауро 35/1, 31036 Истрана (ТВ), Италия).

**ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В ООО «ЯДРАН», 119330, Г. МОСКВА, ЛОМОНОСОВСКИЙ ПР–Т, Д. 38, ОФИС VII, ТЕЛ./ФАКС: +7 (499) 143–33–71.**

Внимание! В данном документе представлены только ОСНОВНЫЕ сведения, все дополнительные параметры содержатся в Инструкции по применению для специалистов с медицинским образованием и также могут быть предоставлены по запросу.

www.adiarin.ru

